# Lumiblok



Le Lumiblok a été développé pour dégager la zone opératoire et faciliter la pose des contentions linguales et palatines.

# Concept et avantages

### > DOUBLE UTILISATION

Le miroir amovible permet de réfléchir la lumière sur la face antérieure des dents, zone impossible à éclairer en éclairage direct.

Il permet un contrôle et une réalisation de l'acte à l'aide d'une vision indirecte ce qui offre une posture de travail confortable.

Le cale-bouche est réversible puisqu'il permet la pose de contentions linguales et palatines.

### > ERGONOMIQUE

La conception de la cale permet d'obtenir une stabilité accrue et apporte un confort au patient.

L'ergot de calage en partie inférieure vient se placer entre les dents 5 et 6 (ou 6 et 7 dans le cas d'avulsions de prémolaires) et évite tout glissement du cale-bouche.

La forme bombée en partie supérieure s'adapte à la cinématique de l'ouverture buccale et permet au patient de simplement « mordre » la cale sans effort, ce qui est moins fatiguant musculairement que de maintenir la bouche ouverte.

Le miroir dispose d'une partie descendante qui repousse la langue et dégage la zone opératoire.

Des échancrures latérales permettent le passage de l'aspiration salivaire sachant que la conception du Lumiblok réduit les efforts musculaires ce qui diminue significativement la production salivaire.

# Exemples d'utilisation:

continuez à lire >

## > ÉCOLOGIQUE

Le Lumiblok est réutilisable!

Le miroir est amovible ce qui facilite l'entretien et le nettoyage afin de gagner en longévité.

L'ensemble des deux pièces est compatible avec les cycles de nettoyage et de stérilisation en vigueur, que ça soit en cycle à froid ou en autoclave vapeur.

# Caractéristiques techniques

### > ESPACE DE TRAVAIL

### › Lumiblok Petit modèle


Ouverture buccale: 30mm

Espace de travail antéro-postérieur maxillaire : 17mm Espace de travail antéro-postérieur mandibulaire : 12mm

### › Lumiblok Grand modèle

Ouverture buccale: 35mm

Espace de travail antéro-postérieur maxillaire : 19mm Espace de travail antéro-postérieur mandibulaire : 14mm

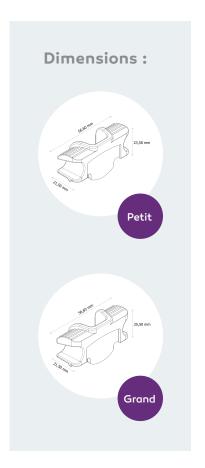





Le Millenium – 18 rue Albert Camus 90000 Belfort – France contact@innoralis.fr

