

# KIT DE MOTIVATION DU CHRONOMASK®

GUIDE D'UTILISATION

## EXEMPLAIRE PATIENT



# 1. INSTALLATION DE L'APPLICATION DE MOTIVATION

## Configuration requise

Avant d'installer l'application de motivation du Chronomask®, veuillez-vous assurer que votre smartphone ou tablette satisfait au minimum à la configuration suivante :

Connexion	Internet (Wifi ou 3G/4G) / Bluetooth
Version Android	Android 5.XX ou ultérieur

Télécharger l'application « Ekyoki et le Chronomask® » sur Play Store grâce au QR code ci-dessous.

**⚠ Le smartphone ou la tablette doit être connecté à internet pour pouvoir télécharger l'application et pour pouvoir afficher les aventures d'Ekyoki**



# 2. UTILISATION DE L'APPLICATION DE MOTIVATION

## 2.1. PREMIERE CONNEXION




Au lancement de l'application, une autorisation d'utilisation de l'appareil photo de votre smartphone/tablette est demandée : elle doit être accordée car l'appareil photo est nécessaire pour pouvoir scanner le **QR code** fourni avec le kit de motivation et qui contient la licence d'activation de l'application

**⚠ ATTENTION : la licence est à usage unique : Un QRcode = un patient.**

## 2.2. PAGE DE DEMARRAGE DE L'APPLICATION

Une fois la licence validée, l'application est débloquée. La page de démarrage de l'application se présente sous cette forme :



- Une barre de progression du traitement, en haut de l'écran, renseigne sur le nombre d'histoires débloquées et donc sur la progression du traitement orthopédique : chaque case représente une histoire. Le nombre d'histoires débloquées est matérialisé par des cases rouges.
- 3 boutons en bas de l'écran sont disponibles :
  - **A gauche le bouton « Déblocage »**  permet au praticien de débloquent des histoires dans des cas exceptionnels.
  - **Au centre, le bouton « Lire histoire »**  permet d'accéder au menu des histoires.
  - **A droite le bouton « Connexion »**  permet de connecter le téléphone ou la tablette au Chronomask®.

### 2.3. CONNEXION DU CHRONOMASK®

Afin de débloquer une nouvelle histoire, il est nécessaire de connecter, via le Bluetooth, le Chronomask® à l'application de motivation.

**⚠ NOTE : La fonction Bluetooth de votre smartphone ou de votre tablette doit être activée pour pouvoir connecter le Chronomask®**

Précision importante : La connexion Bluetooth du Chronomask® n'est pas permanente : elle n'est activée que le temps de téléchargement des données.

Après quoi, la connexion est interrompue.

**IL N'Y A DONC PAS DE DANGER POUR LE PATIENT.**



#### **⚠ Notes préliminaires**

Le Chronomask® et le smartphone/tablette doivent rester proches lors de la connexion et du téléchargement des données sous peine d'échec du transfert.



**IMPORTANT : Le transfert des données ne doit se faire qu'une SEULE FOIS PAR SEMAINE pour éviter une usure prématurée de la pile et le risque de ne plus pouvoir enregistrer de données.**

## PROCEDURE

1. Cliquer sur le bouton « **Connexion** » pour accéder à la page de connexion
2. Effectuer **3 tractions sur la tige** d'accrochage des élastiques du Chronomask® comme indiqué à l'écran
3. Cliquer ensuite sur le bouton « **OK** »
4. Lorsque le Chronomask® est détecté par l'application, le texte « **Connexion en cours** » s'affiche à l'écran.  
Si la détection du Chronomask® ne se fait pas, le texte « **Recherche du Chronomask® en cours...** » persiste à l'écran. Il faut recommencer alors l'étape n°2.
5. Une fois le Chronomask® connecté, cliquer sur le bouton « **OK** » qui s'affiche pour télécharger les données.

**⚠ Le téléchargement des données peut durer plusieurs minutes.**

Une fois le téléchargement terminé, deux éventualités sont possibles :

- **soit le Chronomask® a été bien porté** : un message de félicitation s'affiche ainsi que l'image de la carte récompensant le patient, laquelle lui sera remise au cabinet lors du prochain rendez-vous.  
Cliquer sur le bouton « Lire l'histoire » pour connaître la suite des aventures d'Ekyoki.



- soit le Chronomask® n'a pas été bien porté : un message d'échec s'affiche et il n'est pas possible de lire l'histoire suivante des aventures d'Ekyoki.

