

1. Description


Le système Yelpa est un système d'appel sans fil permettant d'améliorer la communication praticien / assistant(es).

2. Composants

2.1. Bouton d'appel



2.2. Récepteur

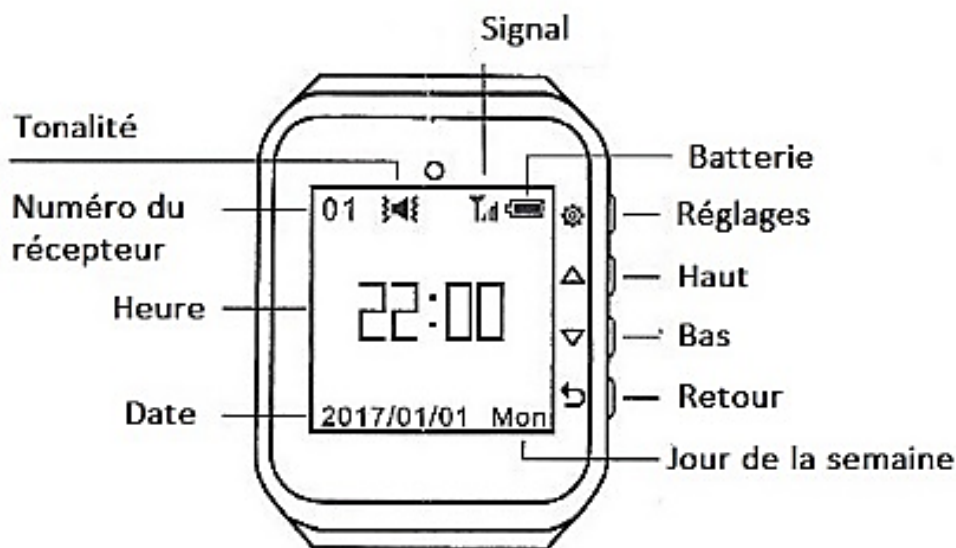

Description des touches :

Appui court : Appui d'environ 1 seconde.

Appui long : Appui d'environ 3 secondes.

[⚙️] Réglages : Appui long pour accéder à la liste des réglages, appui court pour valider ou éteindre l'écran depuis la page d'accueil.

[△] Touche du haut : Appui court pour monter.

[▽] Touche du bas : Appui court pour descendre.

[↩️] Retour : Appui long pour éteindre l'appareil, appui court pour revenir au menu précédent.

Allumer/éteindre le récepteur

Allumer : Lorsque l'appareil est éteint, faire un appui long sur [↵] jusqu'à ce que l'écran s'allume.

Eteindre : Lorsque l'appareil est allumé, faire un appui long sur [↵] puis appuyer sur [⚙️] pour confirmer

3. Paramétrage du récepteur

3.1. Appairer/supprimer un bouton d'appel

Plusieurs boutons d'appels peuvent être utilisés pour un seul récepteur, une multitude de configurations s'offre ainsi à vous.

3.1.1. Appairer un bouton d'appel

Appuyez longuement sur [⚙️] pour accéder à la liste des réglages. Utilisez [△] [▽] pour atteindre « Ajouter boutons », puis sur [⚙️] pour valider le choix.

L'utilisateur peut utiliser [△] [▽] pour sélectionner le numéro ou la lettre à attribuer au bouton. Appuyez longuement sur [⚙️] pour déplacer le curseur vers la gauche.

Après avoir sélectionné le numéro, et que « Appuyer bouton » est affiché à l'écran, l'utilisateur peut alors presser sur le bouton d'appel à appairer, le récepteur sonne après avoir reçu le signal en provenance du bouton d'appel, cela signifie qu'il a été appairé avec succès.

3.1.2. Supprimer un bouton d'appel enregistré

Appuyez longuement sur [⚙️] pour accéder à la liste des réglages. Utilisez [△] [▽] pour atteindre « Ajouter boutons », puis sur [⚙️] pour valider le choix.

Appuyez sur [△] [▽] pour trouver le numéro attribué au bouton d'appel devant être supprimé, et appuyez sur [⚙️] une fois pour supprimer le dernier bouton d'appel appairé.

Vous pouvez aussi utiliser le menu « Params par déf » (§ 3.14.) pour supprimer tous les boutons d'appel appairés.

3.2. Choix du nom du bouton d'appel

Chaque bouton appairé peut avoir en plus de son numéro un nom de désignation choisi (ex : bouton 1 = Secrétaire, bouton 2 = Radiologie).

ATTENTION : Un bouton d'appel doit être préalablement appairé pour effectuer cette manipulation.

Appuyez longuement sur [⚙️] pour accéder à la liste des réglages. Appuyez sur [△] [▽] pour atteindre « Nom d'appel », puis sur [⚙️] pour valider le choix. A l'aide des touches [△] [▽], choisir parmi les noms suivants : « Annuler, Facture, Commande, Appel, Service, Eau, Café, Jus, Positif, Négatif, Médicament, SOS, Seringue, Docteur, Nettoyage, Secrétaire, Paiement, Réception, Assistante, Fauteuil, Préparation, Stérilisation, Radiologie, Laboratoire », puis appuyer sur le bouton d'appel souhaité. Le récepteur sonne et « Set ok » apparaît à l'écran : la définition du nom a réussi.

3.3. Réglage des alarmes

Jusqu'à 10 alarmes (réveil, heure de pause, ...) peuvent être programmées sur le récepteur.

Appuyez longuement sur [⚙️] pour accéder à la liste des réglages. Appuyez sur [△] [▽] pour atteindre « Alarme », puis sur [⚙️] pour valider le choix.

3.3.1. Ajouter une alarme

Appuyez sur [⚙️] lorsque « +Ajouter » est surligné. Appuyez sur [⚙️] pour basculer entre les heures, les minutes, les jours de la semaine et le curseur, et sur [△] [▽] pour les modifier. L'alarme est activée lorsque le curseur est vert. Appuyez sur [↵] pour valider et quitter. NB :

3.3.2. Supprimer une alarme

Appuyez sur [△] [▽] pour sélectionner l'alarme à supprimer, puis appuyez longuement sur [⚙️] pour la supprimer. Appuyez sur [↵] pour quitter le menu.

3.4. Réglage de l'heure et de la date

Appuyez longuement sur [⚙️] pour accéder à la liste des réglages. Appuyez sur [△] [▽] pour atteindre « Date&Heure », puis sur [⚙️] pour valider le choix.

Appuyez sur [⚙️] pour naviguer entre les heures, les minutes, les secondes, les années, les mois, et les jours, et sur [△] [▽] pour les modifier. Appuyez sur la touche [↵] pour valider et quitter.

3.5. Réglage de la tonalité des sonneries

4 tonalités de sonneries sont possibles : sonnerie + vibration, vibration, sonnerie, muet.

Appuyez longuement sur [⚙️] pour accéder à la liste des réglages. Appuyez sur [△] [▽] pour atteindre « Param. Sonnerie », puis sur [⚙️] pour valider le choix.

Appuyez sur [△] [▽] pour sélectionner la tonalité désirée. Appuyez sur [↵] pour valider et quitter.

3.6. Réglage de la répétition des sonneries

La répétition de la sonnerie d'appel est paramétrable.

Appuyez longuement sur [⚙️] pour accéder à la liste des réglages.

Appuyez sur [△] [▽] pour atteindre « Nbre sonneries », puis sur [⚙️] pour valider le choix.

Appuyez sur [△] [▽] pour sélectionner le nombre désiré de sonnerie pour chaque appel (par défaut la valeur est de 9). Appuyez sur [⚙️] pour valider et quitter.

3.7. Mise en veille de l'écran

Appuyez longuement sur [⚙️] pour accéder à la liste des réglages.

Appuyez sur [△] [▽] pour atteindre « Veille écran », puis sur [⚙️] pour valider le choix.

Appuyez sur [△] [▽] pour sélectionner le temps désiré avant la mise en veille de l'écran (par défaut la valeur est de 15 secondes). Appuyez sur [⚙️] pour valider et quitter

3.8. Choix de la langue

Appuyez longuement sur [] pour accéder à la liste des réglages.




Appuyez sur [] [] pour atteindre « Langues », puis sur [] pour valider le choix.




Appuyez sur [] [] pour sélectionner la langue désirée, puis sur [] pour valider et quitter.

3.9. Réglage du minuteur

Un minuteur peut être ajouté sur le récepteur, celui-ci est utile pour rappeler une fin de stérilisation par exemple.

Appuyez longuement sur [] pour accéder à la liste des réglages.

Appuyez sur [] [] pour atteindre « Minuteur », puis sur [] pour valider le choix.




Appuyez sur [] [] pour sélectionner le temps de chronométrage, puis sur [] pour valider et quitter.

Si le curseur est vert, le minuteur est activé et le temps s'affiche et commence à défiler quand vous arrivez sur la page d'accueil.





3.10. Mise sous/hors tension automatique

Le récepteur peut être programmé pour s'allumer et/ou s'éteindre automatiquement. 10 horaires maximum peuvent être prévus.

Appuyez longuement sur [] pour accéder à la liste des réglages.

Appuyez sur [] [] pour atteindre « Allumage Auto. », puis sur [] pour valider le choix.

3.10.1. Ajouter une mise sous ou hors tension

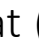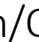Appuyez sur [] lorsque « +Ajouter » est surligné. Appuyez sur [] pour naviguer entre les heures, les minutes, les jours de la semaine, l'état (On/Off) et le curseur, et sur [] [] pour modifier les valeurs.

Appuyez sur [] pour valider et quitter.

Le récepteur est mis sous tension à l'heure et au jour de semaine définis lorsque la valeur de l'état est sur « On » ; il est mis hors tension lorsque la valeur de l'état est sur « Off ». Le paramètre est activé si le curseur est vert.

3.10.2. Supprimer une mise sous/hors tension

Dans le menu « Allumage auto. », appuyez sur [△] [▽] pour sélectionner l'horaire à supprimer, puis appuyez longuement sur [⚙️] pour la supprimer. Appuyez sur [↩] pour quitter le menu.

3.11. Choisir le numéro du récepteur

Le numéro du récepteur peut être modifié, celui-ci apparaît en haut à gauche de l'écran d'accueil.

Appuyez longuement sur [⚙️] pour accéder à la liste des réglages. Appuyez sur [△] [▽] pour atteindre « Num. Récepteur », puis sur [⚙️] pour valider le choix.

Appuyez sur [△] [▽] pour sélectionner le numéro désiré, puis appuyez sur [⚙️] pour valider et quitter.

3.12. Délai d'effacement automatique des appels

Le journal d'appel de la page d'accueil peut s'effacer automatiquement après un délai souhaité.

Par défaut le délai est de 0 seconde, l'effacement est donc manuel. Nous recommandons de laisser ce délai pour ne pas rater un appel.

Appuyez longuement sur [⚙️] pour accéder à la liste des réglages. Appuyez sur [△] [▽] pour atteindre « Effacement Auto », puis sur [⚙️] pour valider le choix.

Appuyez sur [△] [▽] pour sélectionner le délai désiré, puis appuyez sur [⚙️] pour valider et quitter.

3.13. Délai de rappel d'un appel

Un rappel des appels reçus peut-être programmé si jamais le premier n'a pas été entendu. Par défaut, la valeur est de 0 seconde, il n'y a pas de rappel).

Appuyez longuement sur [⚙️] pour accéder à la liste des réglages. Appuyez sur [△] [▽] pour atteindre « Délai rappel », puis sur [⚙️] pour valider le choix.

Appuyez sur [△] [▽] pour sélectionner le délai désiré, puis appuyez sur [⚙️] pour valider et quitter.

3.14. Paramètres par défaut

Les paramètres du récepteur peuvent être réinitialisés : Supprimer tous les boutons, Nom des boutons d'appel par défaut, Tous les autres paramètres par défaut.

Appuyez longuement sur [⚙️] pour accéder à la liste des réglages. Appuyez sur [△] [▽] pour atteindre « Params par déf », puis sur [⚙️] pour valider le choix.

Appuyez sur [△] [▽] pour choisir les paramètres à réinitialiser et sélectionnez-les avec [⚙️]. Déplacez le curseur sur « OK », et appuyez sur [⚙️] pour confirmer.

3.15. Historique des appels

Appuyez longuement sur [⚙️] pour accéder à la liste des réglages. Appuyez sur [△] [▽] pour atteindre « Journal appel », puis sur [⚙️] pour valider le choix. Appuyez sur [△] [▽] pour faire défiler l'historique, puis appuyez sur [↩️] pour quitter.

Attention

1. Le récepteur ne peut pas recevoir d'appel pendant les réglages
2. Aucun des deux appareils n'est étanche.


Spécifications du récepteur

1. Tension d'alimentation : DC3.7V (batterie rechargeable)
2. Courant : <4mA
3. Courant de veille <50μA
4. Fréquence : 433,92MHz
5. Distance d'appel (en espace ouvert) : 300m
6. Plage de température d'utilisation : de -20°C à 55°C
7. Dimensions : 61 x 41 x 14 mm (bracelet de montre non inclus)

Spécifications du bouton d'appel

1. Batterie : 23A 12V pile alcaline (incluse)
2. Taille du bouton d'appel : Diamètre 6 cm, épaisseur 1,8 cm
3. Bouton d'appel avec antenne intégrée

Comment remplacer la batterie du bouton d'appel

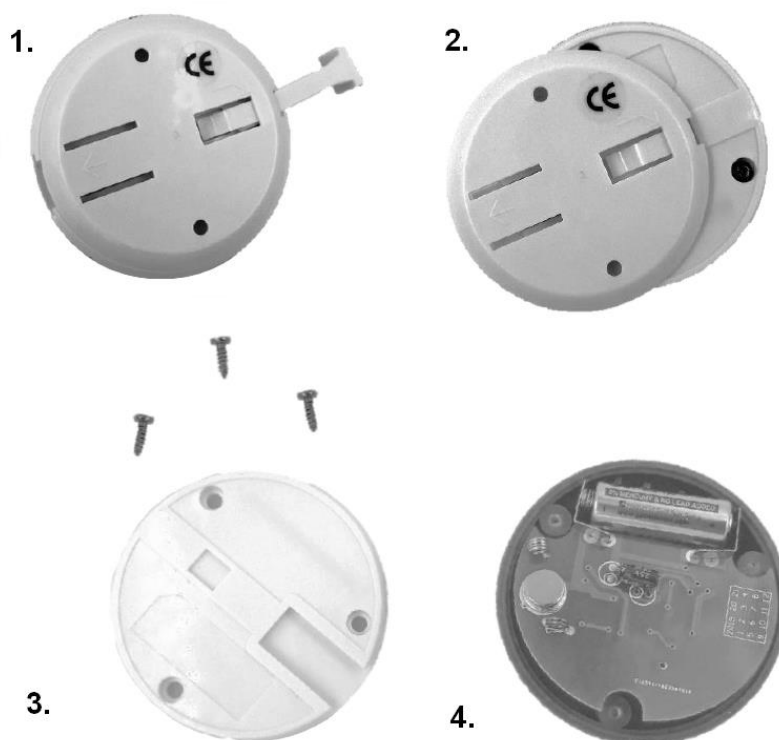

Dépannage

Dysfonctionnement	Cause	Solution
1. Le récepteur ne répond pas lorsque vous appuyez sur le bouton d'appel	1. Le bouton d'appel n'est pas appairé 2. Le bouton d'appel n'a pas assez de batterie	1. Ajouter l'émetteur (§ 3.1.) 2. Remplacer la pile du bouton d'appel
2. Portée du signal trop courte	Le bouton d'appel n'a pas assez de batterie	Remplacer la pile du bouton d'appel
3. Pas de vibration ou de son lorsque vous recevez un appel	La tonalité n'est pas configurée	Entrer dans le menu de réglage de la tonalité (§ 3.5.)
4. Arrêt automatique du récepteur	1. La batterie est trop faible 2. Réglage des mises sous/hors tension	1. Rechargez l'appareil 2. Supprimez les horaires de mise hors tension superflus (§ 3.10.)